

# FORMOSTAR<sup>®</sup> ★

## FORMOSTAR-Cardio

Stand 11.06.2019



### TECHNISCHE DATEN

---

**Eingangsspannung: 230/115 Volt, 50/ 60 Hz.**

**Ausgangsspannung: 24 Volt.**

**Leistung (Standby) : 11,8VA**

**Leistung (1 Bandage): 79,6VA**

**Leistung (2 Bandagen): 158,8VA**

**Maße: B 50 cm x 50 cm (Grundplatte), H 106 cm**

### FUNKTIONSWEISE

---

**Das Gerät wird neben einem oder zwischen zwei Cardiometer platziert. Der Kunde bedient das Gerät selbst wie folgt:**

- **Bandage vom Gerät nehmen und umlegen (Klett, selbsterklärend)**
- **Startknopf drücken (Die Bandage heizt auf, 25-Minuten-Timer startet)**
- **Cardiometer-Anwendung wird durchgeführt.**
- **Nach 25 Minuten schaltet sich das Gerät - begleitet von einem akustischen Signal - selbstständig ab.**
- **Bandage wird abgenommen und wieder über den Halter am Gerät gehängt.**

**Das Gerät verfügt über zwei unabhängige Timer. Es können zwei Anwendungen zeitgleich oder auch zeitversetzt erfolgen.**